



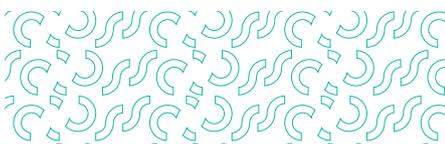

# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

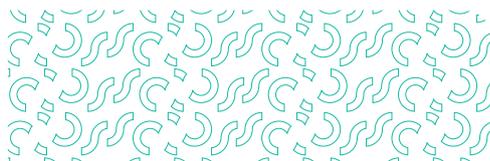

## DEKO

LAVEUR DESINFECTEUR  
DE BASSINS

# DEKO

## LE SEUL DÉSINFECTEUR DE BASSINS !

Il assure une action complète et optimale sur tous les micro-organismes grâce à :

- ✓ Un **lavage** haute performance en **circuit fermé**.
- ✓ **L'efficacité du détergent** garantie par le temps de contact respecté (cercle de Sinner).
- ✓ **La désinfection thermique**.

### Témoignage

**" Le DEKO est en fonctionnement depuis 20 ans dans notre établissement !**

*Nous étions à la recherche d'un équipement d'un bon rapport qualité/prix et facile d'utilisation. Scemed nous a convaincu avec son laveur désinfecteur de bassins DEKO. Depuis, il a tenu ses promesses !*


*Nous l'utilisons dans notre établissement depuis 20 ans de façon intensive et nos équipes sont ravies. Le DEKO nous permet une qualité de lavage optimale des ustensiles, en ne demandant que très peu d'entretien. "*

**Nathalie,**  
Technicienne hospitalière.

## Un concept unique pour un lavage haute performance

Lors de la phase de lavage :

Eau + détergent

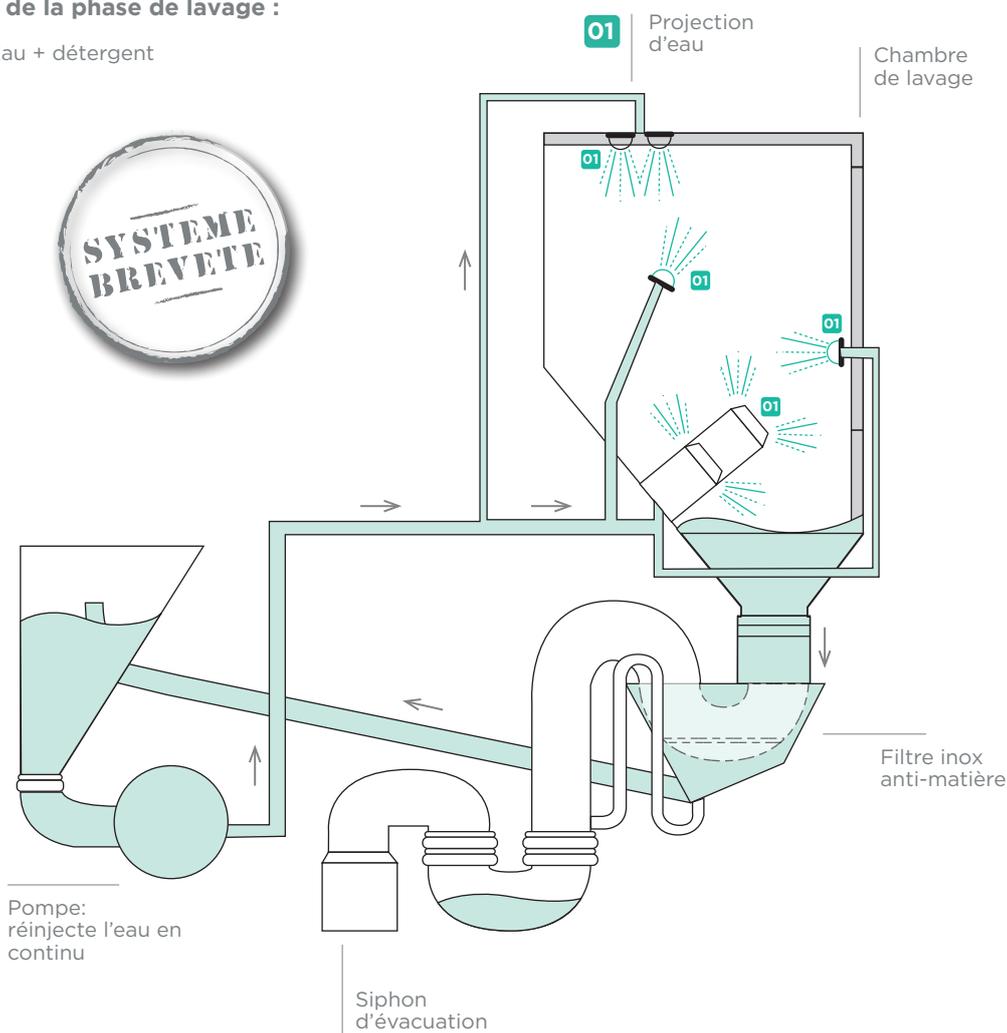

### LE CERCLE DE SINNER RESPECTÉ

Le cercle de Sinner définit les quatre facteurs pour un nettoyage efficace.


Le DEKO est le seul laveur désinfecteur de bassins capable d'y répondre.



\* Programmé par défaut à 5 minutes (temps d'action du détergent SCEMED).

# DEKO GT

## LE LAVE-BASSINS DEKO GT avec porte manuelle

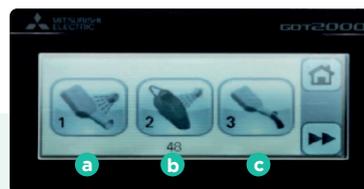

Écran de commandes du Deko GT

- a** Pour démarrer un cycle normal
- b** Pour démarrer un cycle intensif
- c** Pour démarrer un cycle de vidange

- 1.** Interrupteur principal.
- 2.** Tableau de commandes tactile simple d'utilisation.
- 3.** Structure en inox de qualité 14301, avec double isolation thermique et phonique.
- 4.** Casier pour détergent à porte verrouillable\* avec témoin de niveau de produit.
- 5.** Pieds réglables pour ajuster la stabilité.
- 6.** Poignée ergonomique avec sécurité anti-retour de la porte :
  - Chambre de lavage grande capacité
  - Lavage haute performance : 10 buses en inox dont 3 rotatives.
  - Grille horizontale intégrée pour le positionnement des récipients les plus volumineux.

\* Option

# DEKO X2

## LE LAVE-BASSINS DEKO X2

avec porte automatique\*



\*Disponible également avec porte manuelle.



Écran de commandes du Deko X2

- a** Pour démarrer un cycle de vidange
- b** Pour démarrer un cycle court
- c** Pour démarrer un cycle normal
- d** Pour démarrer un cycle intensif

- 1.** Interrupteur principal.
- 2.** Tableau de commandes tactile intuitif.
- 3. Fabrication tout inox** qualité 14301, avec double isolation thermique et phonique.
- 4. Box à détergent verrouillable\*\*** avec témoin de niveau de produit.
- 5. Pieds réglables** pour ajuster la stabilité.
- 6. Ouverture par cellule :**
  - Chambre de lavage grande capacité
  - Lavage haute performance : 10 buses inox dont 3 rotatives.
  - Grille horizontale intégrée pour le positionnement des récipients les plus volumineux.

\*\* Option

### LES + PRODUIT

- **Mise à jour du logiciel automatique**
- **Ordinateur de contrôle unique :** couleur, port USB, Internet, Carte SD.
- **Port USB en façade :** récupération des données, traçabilité, contrôle qualité sur chaque cycle et suivi de l'utilisation du matériel.



- **Ouverture/Fermeture par cellule sans contact.**

## EFFICACE, FIABLE & DURABLE


- ✓ **10 buses dont 3 rotatives.**
- ✓ **Haute pression d'eau** pour le lavage : 6 à 8 bars.
- ✓ **Cycle de lavage en circuit fermé**, système breveté pour un lavage optimal.
- ✓ **Certifié** norme 15 883-3.
- ✓ **Supports** : 4 urinaux & 2 bassins, seau, réhausse WC, cuvette intégrée.
- ✓ **Désinfection thermique 90°.**
- ✓ **Intérieur en inox** de qualité supérieure.
- ✓ **Pompe à détergent** incluse.
- ✓ **Tableau de commandes** avec indicateur de température de cycles et programmation des cycles de maintenance.

### Capacité

#### Positionnement du matériel dans la chambre de lavage

Suggestions d'installations, d'autres configurations sont possibles.

- Grande chambre de lavage.
- La grille horizontale intégrée permet de positionner les récipients.
- Lavage haute performance grâce aux 10 buses dont 3 rotatives.

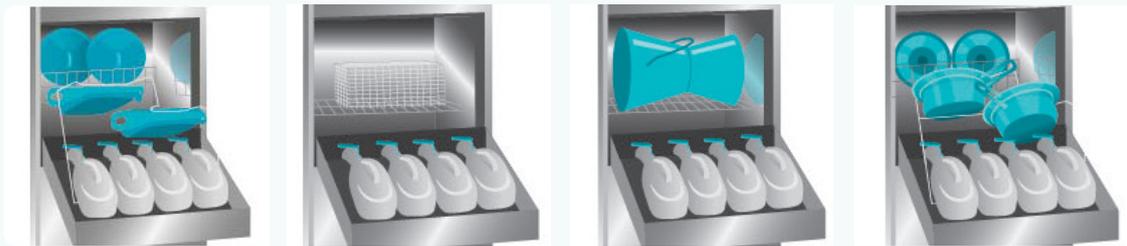

#### Qualité de lavage garantie

Le DEKO s'occupe des tâches désagréables et potentiellement dangereuses : plus besoin de vider ou de rincer les bassins. Avec le pré-lavage, toutes les matières sont évacuées. Les cycles de lavage sont ensuite lancés en circuit fermé pour un résultat impeccable :

- L'eau et le détergent circulent en continu lors de la phase de lavage.
- La pompe fait circuler l'eau avec une puissance de 600L/minute.

### Informations générales

#### Grande capacité

Lave-bassins compact avec une chambre de lavage grande capacité, **lavage en simultané** :



#### Écologique et économique

Si vous souhaitez attendre de remplir la chambre de lavage avant de démarrer un cycle, il est tout de même possible de lancer un pré-lavage qui vide et nettoie les dispositifs médiaux.

L'écran du DEKO indique alors qu'aucune désinfection n'a été lancée.

## Fonctionnalités

### 1 PRÉ-LAVAGE

#### Élimination des matières

À la fermeture de la porte, le programme sélectionné démarre automatiquement. Le Deko effectue un pré-lavage à l'eau froide puis à l'eau tiède, avec une pression d'eau de 6 bars, ce qui permet d'éliminer toutes les substances résiduelles.

### 2 LAVAGE


#### Circuit fermé et détergent

Le cycle de lavage en circuit fermé démarre. L'eau associé à l'action du détergent permet un lavage de haute qualité de tous les ustensiles (bassins, urinaux, seaux, boccas...)

### 3 DÉSINFECTION

#### Désinfection thermique

Le corps de chauffe génère une vapeur de 91°C, qui va désinfecter les dispositifs médicaux et l'ensemble de l'appareil : chambre de lavage, réservoir d'eau, tuyaux et siphon.

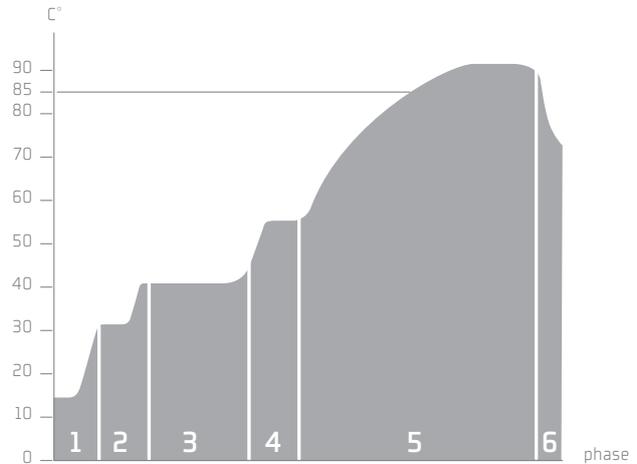

Exemple : lavage court du programme n°3

- **Phase 1** : rinçage à l'eau froide
- **Phase 2** : rinçage à l'eau tiède
- **Phase 3** : lavage à l'eau chaude avec détergent
- **Phase 4** : rinçage à l'eau chaude
- **Phase 5** : désinfection à 91°C pendant 1 min
- **Phase 6** : refroidissement

Tous les programmes peuvent être paramétrés par nos techniciens pour répondre à vos besoins spécifiques : nombre de cycles de lavage, temps de contact, cycle automatique de maintenance ...

Cette fonctionnalité n'est pas accessible aux utilisateurs.

## Chambre de lavage



2 buses rotatives  
"de face"



7 buses fixes



1 buse rotative  
de côté

## Informations techniques

**Dimensions :** L.600 x P.630 x H.1460 mm


**Dimensions de la chambre de lavage :**

L.480 x l.360 x P.640 mm

**Niveau sonore :** 61 Db

**Poids :** 130 Kg

Consommation moyenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau/cycle : 9L</li> <li>• Eau programme : 40L (pour 8 ustensiles)</li> <li>• Energie : 0,4 Kw/cycle</li> </ul>
Puissance de chauffage	7,5 Kw
Pompe de circulation	1,5 Kw, débit 600 L/min
Pression d'eau	Min 1 bar/ Max 8 bars
Poids	130 Kg
Raccord d'eau (chaude & froide)	1/2 (mâle)
Raccord d'évacuation	90 - 100 mm
Raccordement électrique	380 V, 3PH + N, 50 Hz (recommandé), 16A autres voltages disponibles, nous consulter.

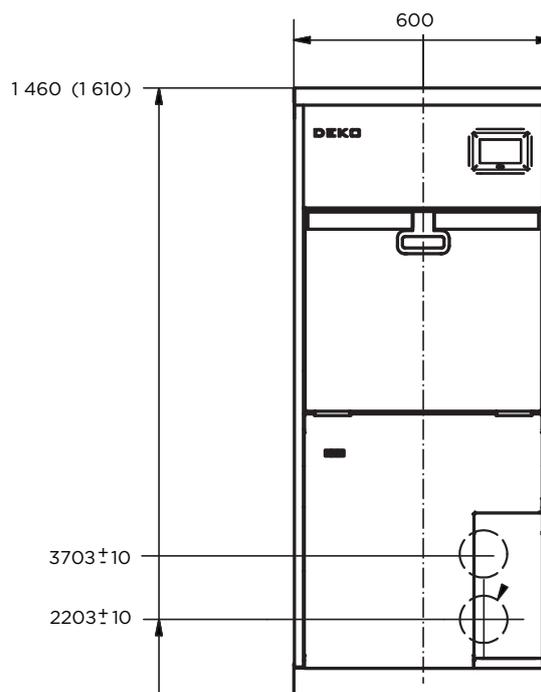


## Les normes

Le lave-bassins DEKO est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE. Il est certifié :

ISO 9001	Systèmes de management de la qualité
EN ISO 15883-1 / EN ISO 15883-3	Exigences et essais pour laveurs désinfecteurs destinés à la désinfection thermique
EN ISO 13485	Systèmes de management de la qualité appliqués aux dispositifs médicaux
NF EN 61010-1, NF EN 61010-2-040, NF EN 61326-1	Exigences de sécurité pour les laveurs désinfecteurs

La qualité de lavage et de la désinfection a été validée par un laboratoire agréé indépendant avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années ainsi que par l'Institut Pasteur.



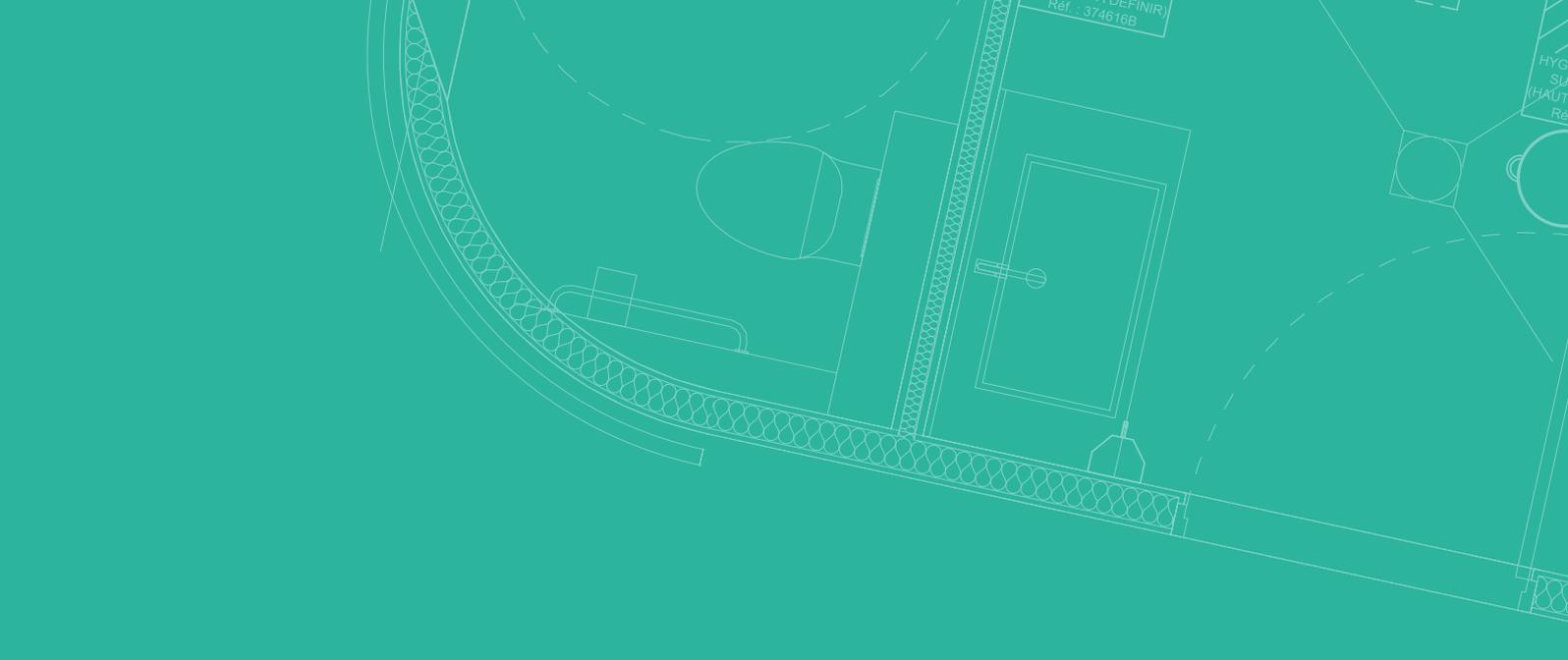

# VOTRE PROJET EST UNIQUE

---

**En tant qu'agenceur de local de désinfection, nous vous proposons des solutions sur-mesure** pour optimiser les espaces de travail selon vos besoins et les équipements nécessaires.

**Nos conseillers et notre bureau d'études sont disponibles pour vous accompagner** : préconisations techniques et conseils en ergonomie, réalisation de plans et projections 3D.





Les supports de stockage

Notre gamme de supports à fixation murale, à poser sur le LB DEKO et de rayonnages filaires, sont parfaits pour le stockage dans l'espace salle de bain ou dans vos locaux de désinfection.


Ils permettent d'optimiser le volume disponible dans les locaux exigus.



Support mural inox  
REF. : 620232



Rayonnage Hygirack  
REF. : 620232

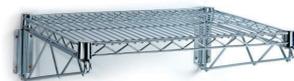

Etagère murale Hygirack  
REF. : 620667



Distributeur de gants  
REF. : 620663



Support inox à poser  
REF. : 620231




Support mural inox  
REF. : 620232

## Les accessoires



**Paniers d'ustensiles  
avec couvercle**  
REF. : 1300400

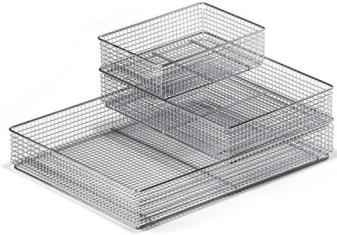

**Plateau d'instruments**  
REF. 1 : 1300402  
REF. 2 : 1300403  
REF. 3 : 1300404



**Grille pour bassins (x4)**  
REF. : 1300409



**Grille pour tubes (x12)**  
REF. : 1300405



**Grille pour chaussures  
(4 paires)**  
REF. : 620019



**Insert pour urinoirs (x4)**  
REF. : 620021



**Grille pour bouteille**  
REF. : 1300406



**Insert basculant pour  
bouteilles (x2)**  
REF. : 1300407



**Support pour canules (x6)**  
REF. : 620022



**Bassin de lit "confort"**  
REF. : 620004



**Urinal**  
REF. : 620007



### **FORMATION**

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



### **CONSEILS PERSONNALISÉS**

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



### **CONTRAT DE MAINTENANCE**

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

[Scemed.com](https://www.scemed.com)



#### **LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL**

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

**Tél. : 03 20 28 04 28**

**Fax. : 03 20 28 04 00**

**Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)**

Suivez nous sur :

